

車いすを最も快適な場所に
J3バック 世界同時発売



快適性と安定性と活動性のために！

ジェイ J3 バック



J3バックは、
車いすの背布に代えて、だれでも簡単に使用できる
最も進化したバックサポートです。

● **痛みを解消！一日中快適にサポート**

車いすに乗ることで生じる疲れと痛みの原因である背布。
しかし車いすをたたむためには布製の背布が必要でした。
J2バックでその常識を打ち破ったシーティングの世界的なブランド
ジェイから、さらに進化したバックサポートの登場です。

● **個人に合わせて簡単にフィット**

使用される方が必要とする背面と側面からのサポート力は異なります。
J3バックは、形状・高さ・角度・取付位置がすべて選択可能。
個人に合わせて体と一体化したバックサポートが簡単に完成します。

東京本社
〒176-0003 東京都練馬区羽沢 3-40-7
TEL : 03-5912-8611 FAX : 03-5912-8622

ACCESS
international

大阪営業所
〒590-0982 大阪府堺市堺区海山町 4-163-11
TEL : 072-223-1152 FAX : 072-223-1154

快適性と安定性と活動性のために！

ジェイ J3 バック

背面に合わせた最適なフィットが安定性と快適性を提供します。豊富なサイズと形状から選択いただけます。

形状



高さ



カスタム化



背面形状適合システム J3カスタムパーツ

背面に円背や軽度の変形があると、通常のバックサポートでは突起部分が当たって痛みが生じます。J3バックには、様々な形状と大きさのカスタム用パーツが用意されています。これらを使用して背面の突起部分や陥没部分に対応し、背中の圧を分散することで、快適で長時間使用できるバックサポートがデザインできます。

角度 + 奥行き



必要に応じてJ3バックの角度と奥行きが調整できます。取付位置を前後に変更することで、シートの奥行きを調整して設定できます。

J3バック専用の取付金具 「JAYマウント」



ワンタッチ着脱+しっかり固定

車椅子に合わせて取付位置を選択できます



図は取付金具とバックシェルのみ

簡単な取付

アームレストやサイドガードがバックポストに溶接されている車いすでも、左右のバックポストに約5cmの取り付けスペースがあれば取り付けが可能です。*対応可能な車いすバックポストのパイプ径：1.9cm～2.85cm (3/4"～1 1/8")

幅の調整が可能

「JAYマウント」の調節機能により、約5cmの範囲で取付け幅の調整が可能です。

奥行き調整が可能

奥行き調整機能により、シートの奥行きを減らすことなく使用者に最適なバックサポート位置を設定できます。

角度の調整が可能

J3バックは個人のニーズに合わせて背面角度の調整が可能です。

